

# Een **kompaan** op zakformaat

Mijn Kompy - handleiding  
**Kompy Pico**



The logo for ComfoCare, consisting of a stylized 'C' inside a circle.**ComfoCare**  
*Slimme oplossingen voor Comfortabel, Veilig  
en Levensloopbestendig wonen & werken*

+31 (0)46 234 01 01  
info@comfocare.nl

www.comfocare.nl  
ComfoCareNL

## Inhoud

1. Inhoud doos	3
2. Product overzicht/funcities	3
3. Oplaadstation	3
4. Veiligheidsinstructies	4
5. Eerste gebruik	5
6. Alarm maken	5
7. Uitleg Kompy Pico LED	6
8. Technische informatie	6
9. Recycle informatie	7

## Voorwoord

Hartelijk dank voor het gebruik van onze Kompy Pico. Wij hebben dit apparaat met de grootste zorg ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulp nodig heeft. De Kompy Pico van Safetytracer zorgt in dergelijke situaties voor snelle hulpverlening. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

## 1. Inhoud doos

1. Kompy Pico
2. Magnetisch laadsnoer
3. Power adapter



## 2. Product overzicht/functies

1. Aan/uit & bel knop
2. Alarm knop
3. Microfoon
4. GPS LED licht
5. GSM LED licht
6. Luidspreker
7. Oplaadpunten



## 3. Oplaadstation

Optioneel kan er een oplaadstation worden meegeleverd met de Kompy Pico. Met dit oplaadstation is het nóg gemakkelijker om de Kompy Pico op te laden.

(Let op: de knoppen op het oplaadstation kunnen niet worden gebruikt om alarm te slaan.)

- Om het oplaadstation te gebruiken, sluit u het verbindingssnoer aan de onderkant van het oplaadstation aan op de adapter die bij de Kompy Pico geleverd is.
- Steek de adapter in het stopcontact. Er zal nu een blauwe ring oplichten op het oplaadstation.
- Het oplaadstation is nu klaar voor gebruik.
- Om de Kompy Pico op te laden, plaatst u deze eenvoudig in het oplaadstation.



## 4. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de Kompy Pico gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het nodig is, te kunnen raadplegen.

### Informatie

Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij uw leverancier.

Algemene informatie vindt u op [www.safetytracer.eu](http://www.safetytracer.eu)

### Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Voor het correct en veilig installeren en gebruik van de Kompy Pico is het van essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding.

Aanvullende waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding.

Waarschuwings- en veiligheidsteksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op de apparatuur aangebracht.

### Veiligheidsverklaring

Deze apparatuur is getest om te voldoen aan het veiligheidscertificaat in overeenstemming met de specificaties van de norm: EN 60950-1: 2006 + A12: 2011.

### Aansprakelijkheid

SafetyTracer houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is SafetyTracer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:

- Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.
- Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
- Maak de Kompy Pico nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Sluit geen andere apparatuur aan dan de door SafetyTracer aanbevolen apparatuur.
- Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van apparatuur en systemen.
- Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen of buiten indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is ontworpen.
- Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische velden.
- Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
- Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
- De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuur specificatie.

- Door openen of verwijderen van behuizing kunnen spanning voerende delen worden aangeraakt.
- Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

## 5. Eerste gebruik

Voordat u de Kompy Pico kunt gebruiken, dient deze minimaal 4 uur opgeladen te worden.

### Opladen

Om de Kompy Pico op te laden, sluit u het meegeleverde laadsnoer aan op de adapter. Het laadsnoer is voorzien van een magnetische bevestiging. Sluit deze aan op het laadpunt aan de achterkant van de Kompy Pico. De rode led zal langzaam gaan knipperen tijdens het opladen.

### Inschakelen

Zet de Kompy Pico aan door de aan/uit knop 1 seconde in te drukken.

De Kompy Pico uitzetten kan door de aan/uit knop en de alarmknop gelijktijdig 2 sec ingedrukt te houden.

## 6. Alarm maken

Een alarm maakt u door de alarmknop drie seconden ingedrukt te houden. Als het alarm is gemaakt hoort u een gesproken bevestiging van het alarm en de groene led van de Kompy Pico gaat knipperen.

Het is nu ook nog mogelijk om het alarm te annuleren. Hiervoor drukt u nogmaals kort op de alarmknop.

Als het alarm is geactiveerd zal het alarm automatisch in ons platform doorgestuurd worden naar de juiste hulpverlener.

Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de Kompy Pico in alarm staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.


Als het alarm is geaccepteerd door de hulpverlener kan een spreek-/luisterverbinding worden gemaakt zodat een gesprek gevoerd worden. Als de hulpverlener belt naar de Kompy Pico dan komt er meteen een gesprek tot stand.

Een gesprek tussen de hulpverlener en u is alleen mogelijk als u op de alarmknop heeft gedrukt. In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de Kompy Pico.

Om het gesprek te beëindigen, druk op de alarmknop van de Kompy Pico.

## 7. Uitleg Kompy Pico LED

### Groene LED

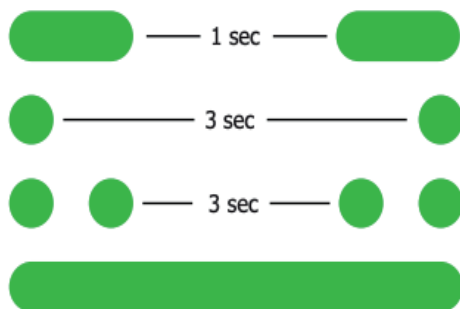


Langzaam knipperen = zoeken naar gsm-netwerk

Kort knipperen = verbonden met gsm-netwerk

Twee keer knipperen = verbonden met gprs

Continue branden = geen of verkeerde simkaart

### Blauwe LED

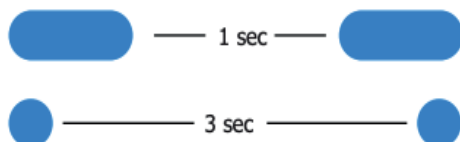

Langzaam knipperen = zoeken naar gps-signaal

Kort knipperen = verbonden met gps

## 8. Technische informatie

<b>Afmeting</b>	60mm x 41mm x 16mm
<b>Gewicht</b>	44 gram
<b>Batterij</b>	900 mAh Li-ion, oplaadbaar
<b>Standby-tijd</b>	120 uur
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-10°C tot +60°C
<b>IP klasse</b>	IP65
<b>Goedkeuring</b>	in overeenstemming met de norm R&TTE 99/CE/05

## 9. Recycle informatie



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product apart moet worden afgevoerd van gewoon huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur in te leveren bij de daarvoor bestemde recyclingcentra.

Voor meer informatie over inzamelpunten voor elektronische apparatuur neem contact op met of raadpleeg de website van de plaatselijke gemeente.

- Gooi de Kompy Pico niet weg met het huisvuil.
- Batterijen horen niet bij het huisvuil en moeten apart worden ingezameld.
- Het weggooien van de verpakking en uw Kompy Pico dient te gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.